

TABELLE IMPOSTAZIONE PER CONCENTRATORI PORTATILI a FLUSSO PULSATO

Prima della prescrizione di ossigenoterapia domiciliare tramite concentratore portatile si raccomanda di consultare la seguente Tabella con l'indicazione delle impostazioni del concentratore Inogen G5 e relativa quantità di ossigeno erogata. L'impostazione della terapia in ossigeno liquido non corrisponde a quella del concentratore portatile: si sottolinea l'importanza di provare il concentratore portatile prima di effettuare la prescrizione. L'apparecchiatura è un dispositivo elettromedicale che prevede la ricarica dello stesso da parte dell'utente o l'utilizzo tramite alimentazione elettrica: se non venisse utilizzato con alimentazione elettrica inserita o batteria carica il dispositivo potrebbe non funzionare. Altresì potrebbe non funzionare in caso di eventuali guasti o malfunzionamenti o rotture dovute ad esempio ad un possibile surriscaldamento legato ad un utilizzo continuativo eccessivo.



Volumi d'impulso Inogen One® G5 alle impostazioni di flusso

Impostazioni di flusso di Inogen One® G5						
Respiri al minuto	1	2	3	4	5	6
15	14	28	42	56	70	84
20	11	21	32	42	53	63
25	8	17	25	34	42	50
30	7	14	21	28	35	42
35	6	12	18	24	30	36
40	5	11	16	21	26	32
mL/respiro +/- 15% per ISO 80601-2-67						
Volume totale al minuto (ml/minuto)	210	420	630	840	1050	1260